

**NOUVEAU !**

# 3M™ Clinpro™ Clear Fluorure

Traitement au fluorure

## Pourquoi le choisir ?

1. Formule transparente à base d'eau, en une unidose L-Pop, rapide et facile à utiliser.
2. Sans colophane ni allergènes\* courants, avec un pH neutre.
3. Phosphate de calcium stabilisé.
4. Temps de contact minimum de 15 minutes seulement.
5. Confort patient avec une meilleure sensation en bouche.
6. Disponible en goût pastèque, menthe et sans goût.

Depuis le 1er février 2025, la nouvelle convention nationale appliquée aux chirurgiens-dentistes étend la prise en charge par l'Assurance Maladie des vernis fluorés chez les patients à risque carieux âgés entre 1 et 25 ans (contre 3 - 24 ans auparavant) à raison d'une application par semestre sur les 2 arcades (code CCAM : HBLD045).



Télécharger  
la brochure



## Protocole

1. Pressez doucement l'embout triangulaire pour libérer le produit dans le petit réservoir intégré.
2. Séchez les surfaces dentaires à l'aide d'une compresse.
3. Appliquez par un mouvement de balayage sur les faces dentaires vestibulaires et palatines à l'aide de la brosse – une unidose L-Pop correspond à l'application sur deux arcades.
4. Temps de contact minimal requis : 15 minutes durant lesquelles le patient ne doit ni manger, ni boire, ni rincer (La libération immédiate des ions fluor, calcium et phosphate favorise une absorption efficace dès l'application)
5. Fréquence d'application: en règle générale, deux fois par an selon le risque carieux individuel.



\*Voir la déclaration des allergènes sur [www.3Mfrance.fr/ClinproClear](http://www.3Mfrance.fr/ClinproClear)

© Solventum 2025. All rights reserved.

17