

3M™ Filtek™ Supreme XTE Universel

Matériau de restauration universel


Pourquoi le choisir ?

1. Belle esthétique grâce à une fluorescence naturelle.
2. 36 teintes radio-opaques et 4 opacités (Dentine, Body, Émail, Translucide).
3. **Nanotechnologie** assurant résistance à l'usure, durabilité, polissage et rétention du poli.
4. Excellente maniabilité, consistance ferme et ne colle pas aux instruments.



StyleItalliano
recettes de teintes :

W Dentine + A2 Email	=	A0
A1 Dentine + A3 Email	=	A1
A2 Dentine + A3 Email	=	A2
A3 Dentine + A3 Email	=	A3
A4 Dentine + A3 Email	=	A3.5
A4 Dentine + A4 Body	=	A4

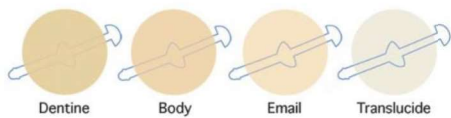

Capsules réchauffables¹



Protocole

3M™ Filtek™ Supreme XTE Universel
Exemple : Recette A2D + A3E = A2



Cas clinique
du Pr Paulo
Monteiro



Situation initiale.



Dépose des restaurations et préparation du biseau avec une fraise diamantée.



Tester la clé en silicone réalisée à partir d'un wax-up.



Restauration des murs palatins sur la clé avec 3M™ Filtek™ Supreme XTE Universel, teinte A3E.



Une fois l'adhésif posé, la clé avec la couche d'émail palatine est positionnée.



Couche d'émail en palatin après photopolymérisation.



Restauration des parois proximales avec 3M™ Filtek™ Supreme XTE Universel, teinte A3E.



Mise en place de la teinte A2D. Création d'un espace de 0,5 mm pour la couche Émail.



Application de la couche vestibulaire, A3 E, avec une épaisseur de 0,5 mm.



Situation finale.

© Solventum 2025. All rights reserved.

1. Capsules réchauffables jusqu'à 70°C pendant une heure maximum.