

# MD 555 cleaner

Nettoyant spécial pour les systèmes d'aspiration  
(à utiliser 2 fois par semaine)



Nettoyant spécial non moussant pour les systèmes d'aspiration et des conduites d'évacuation dans les cabinets dentaires, lorsque la qualité de l'eau pose problème et dans le cas où les tuyaux d'écoulement des eaux usées ont été installés avec une pente insuffisante.



Préserve votre système d'aspiration

Compatibilité des matériaux testée

Recommandé par les principaux fabricants d'unités d'aspiration

Effet de nettoyage intensif

Idéal pour l'utilisation en combinaison avec l'Orotol plus

## Temps d'action

## Recommandation



5 %

30 à 120 min

au moins 2 fois par semaine

Dissout les dépôts incrustés de **poudres prophylactiques** et de **produits perlés**

## Fonctionnement



« **Détartrant/Agent de nettoyage intensif** » :

Excellente performance de nettoyage contre les dépôts, par exemple le calcaire causé par une eau très dure, les résidus de sel tenaces, etc...



## Caractéristiques principales

5 %

concentration de l'application

Efficacité de nettoyage intensif contre les dépôts et les sédiments

Garantit un fonctionnement parfait du système d'aspiration sur les plans technique et hygiénique

