
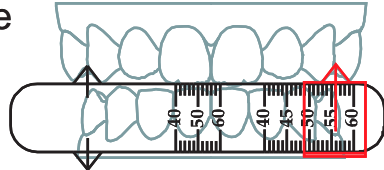
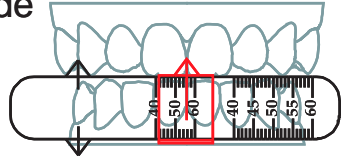


Sélection de la taille

- La première échelle de la règle permet d'effectuer une lecture rapide de la partie distale de la canine supérieure à la ligne médiane interincisive.
- La seconde échelle sert à effectuer une mesure plus précise de la partie distale de la canine supérieure droite à la partie distale de la canine opposée, en suivant le bord libre des dents.

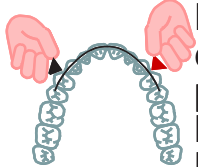

Instructions

- Pour utiliser au mieux l'élasticité du silicone, il est important de demander au patient de **ne pas mastiquer dans l'appareil** mais d'exercer une pression modérée pendant une à trois minutes et de recommencer.

Immédiatement après le retrait de l'appareil fixe, le patient doit commencer à faire les exercices déjà décrits, durant deux à six heures les premiers jours, puis diminuer progressivement dans les quinze jours suivants sans jamais descendre en dessous d'une heure et demie durant la journée. Le patient doit également porter le positionneur la nuit. Il est normal qu'il le perde les premiers temps. Le port nocturne équivaut à une demi-heure d'exercices durant la journée.

Les temps d'utilisation doivent être réglés en fonction des corrections à obtenir.

Sélection de la taille

