

Comment réaliser une réduction interproximale (RIP) lors d'un traitement Smyline ?

- 1 Examinez avec soin la **quantité exacte de RIP programmée** pour cette étape spécifique.



- 2 Utilisez successivement les bandes de **la plus fine à la plus épaisse** jusqu'à ce que la quantité désirée de réduction amélaire soit atteinte.

Protégez les tissus du patient avec des écarteurs de joue ou des bandes de coton.

Ouvrez le contact interproximal avec **la bande diamantée la plus fine**. Appliquez un **mouvement de va-et-vient léger** jusqu'à ce que la bande devienne passive. Puis utilisez une bande plus épaisse pour élargir le contact. Utilisez progressivement des bandes de plus en plus épaisses.

Dans les régions cervicales prenez soin de ne pas créer de rebords. La RIP doit être utilisée avec précaution en cas d'accès restreint, d'émail insuffisant ou si des restaurations, telles que des couronnes ou des bridges, sont concernées.



- 3 Confirmez la quantité d'émail interproximal enlevée avec les **jauges d'épaisseurs**. Vous sentirez une légère résistance dès que la quantité souhaitée aura été enlevée.

- 4 **Polissez la surface interproximale** avec des bandes polissantes jusqu'à ce que la surface adjacente soit ronde et lisse. Vérifiez la dimension finale de l'espace avec les jauges.