

MAINTENANCE DES MICROMOTEURS À CHARBON MC2 ET MC3.



Reportez-vous à la notice d'utilisation du produit pour les procédures complètes d'entretien de nettoyage et de stérilisation. Ce dispositif médical est livré «non stérile». Avant qu'il ne soit utilisé, veuillez vous conformer à la présente procédure.

1 PRÉPARATION



A. DÉCOUPLER LE MOTEUR DU CÂBLE

B. RETIRER LA CALOTTE

2 NETTOYAGE



A. NETTOYAGE EXTERNE AVEC DU SPRAYNET

- Imbiber un chiffon de Spraynet et nettoyez uniquement la partie métallique du moteur et la calotte.

⊘ Ne pas sprayer le moteur.

3 DÉSINFECTION



A. DÉSINFECTION DE SURFACE AVEC UNE SOLUTION POUR INSTRUMENTS DENTAIRES (respecter les indications d'utilisations du fabricant)

⊘ Ne pas immerger l'instrument dans un bain désinfectant

4 STÉRILISATION



A. PLACEZ LA CALOTTE DU MOTEUR DANS UN SACHET DE STÉRILISATION


B. STÉRILISEZ SELON LES INDICATIONS DU FABRICANT

MAINTENANCE


ACCESSOIRES




SPRAYNET
500 ml spray de nettoyage.
Emballage de 6 pièces
REF. 1600036-006

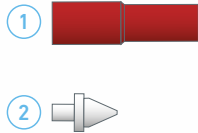

LUBRIFLUID
500 ml lubrifiant
Emballage de 6 pièces
REF. 1600064-006

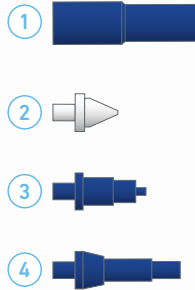

AQUACARE
500 ml spray de nettoyage.
Emballage de 6 pièces
REF. 1600617-006

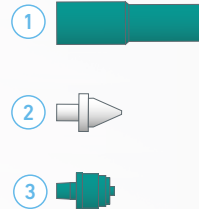

LUBRICARE
Système de maintenance
REF. 1600915-001



LUBRIMED
Emballage de 6 cartouches
REF. 1600037-006



DÉBOUCHE SPRAY
Emballage de 10 pièces
REF. 1000001-010